



Sinus Rinse – zestaw podstawowy dla dorosłych

- izotoniczny
- butelka 240 ml
- saszetki 50 szt.



Sinus Rinse – zestaw podstawowy dla dorosłych

- izotoniczny
- butelka 240 ml
- saszetki 15 szt.



Sinus Rinse – zestaw uzupełniający dla dorosłych

- bez butelki
- saszetki 100 szt.



Sinus Rinse – zestaw uzupełniający dla dorosłych

- izotoniczny
- bez butelki
- saszetki 50 szt.



Sinus Rinse – zestaw podstawowy dla dzieci (4-6 lat)

- izotoniczny
- butelka 120 ml
- saszetki 50 szt.



Sinus Rinse – zestaw podstawowy dla dzieci (4-6 lat)

- izotoniczny
- butelka 120 ml
- saszetki 25 szt.



Sinus Rinse – zestaw uzupełniający dla dzieci (4-6 lat)

- izotoniczny
- bez butelki
- saszetki 100 szt.



Sinus Rinse – zestaw uzupełniający do butelki 240 ml

- hipertoniczny
- bez butelki
- saszetki 70 szt.



NasoGEL Drip Free Gel Spray żel nawilżający w spray'u dla dorosłych

- zawiera Hialuronian Sodiu
- 45 ml



NasaMist Saline Spray spray nawilżający do nosa

- izotoniczny
- 75 ml



NasaMist Saline Spray spray nawilżający do nosa dla dzieci (do lat 6)

- izotoniczny
- 75 ml



NasaMist Saline Spray spray nawilżający do nosa

- hipertoniczny
- 125 ml

Zamówienia od aptek realizujemy bezpośrednio lub przez hurtownie farmaceutyczne.

NeilMed NasoGEL Drip Free Gel Spray – instrukcja stosowania:

Żel nawilżający w spray'u dla dorosłych zawierający Sodium Hyaluronate.

Skład: Chlorek sodu, dwuwęglan sodowy, gliceryna, hialuronian sodu 1%, aloes, alantoina, karboksymetyloceluloza, glikol propylenowy, czysta woda klasy USP. Chlorek bezalkoniowy jako konserwant.

Wskazania: Żel zaleca się stosować w przypadku nieżyty nosa, alergii, zapalenia zatok, przeziębienia, nadmiernego wysuszenia śluzówki nosa spowodowanego przebywaniem w suchym klimacie, ogrzewanym, klimatyzowanym pomieszczeniu, podczas podróży lotniczych, po terapii tlenowej i radioterapii raka głowy i szyi.

Przeciwwskazania: Występująca nadwrażliwość i/lub alergia na jeden ze składników preparatu.

Właściwości: Żel o przedłużonym działaniu doskonale nawilżający suchą śluzówkę nosa, likwidujący uczucie suchości.

Dawkowanie: 1-2 aplikacje do każdego otworu nosowego, zwykle co 4-6 godzin. W przypadku uporczywej suchości, można stosować częściej po konsultacji z lekarzem. Żel przeznaczony dla osób dorosłych.

Ostrzeżenie: Może pojawić się uczucie pieczenia przez kilka sekund, które po chwili ustępuje.

UŻYWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIEM. NIE UŻYWAĆ NA SUCHĘ USTA.

Przechowywanie: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed przemarzeniem, przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.



PRZED UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ!

KROK 1: Zdjąć nasadkę z aplikatora.



KROK 2: Zdjąć zabezpieczający kołnierzyk.



KROK 3: Stosując po raz pierwszy należy:

(a) nacisnąć aplikator i przytrzymać w tej pozycji 4 sekundy, jak pokazano na obrazku.

(b) następnie powrócić do pozycji wyjściowej

(c) powtórzyć punkt (a) i (b) 4 - 5 razy.



UWAGA: Po naciśnięciu aplikatora przytrzymać w tej pozycji przez 4 sekundy (policzyć: 1, 2, 3, 4) przed powrotem do pozycji wyjściowej.

KROK 4: Żel jest gotowy do zastosowania.



KROK 5: Wprowadzić końcówkę aplikatora do każdego nozdrza. Nacisnąć 2-4 razy. Używać co 4-6 godzin. W przypadku uporczywej suchości można stosować częściej po konsultacji z lekarzem.



KROK 6: Po użyciu żelu, nałożyć z powrotem nasadkę na końcówkę aplikatora, aby zapobiec wysychaniu. Aplikator będzie gotowy do użycia przez kilka dni. Po tym czasie ciśnienie w pojemniku zaniknie i procedurę użycia żelu należy rozpocząć od początku.

Pojemność: 45 ml
Produkt medyczny posiadający znak CE
dostępny bez recepty
Data ważności: na opakowaniu


W ALERGII I DOLEGLIWOŚCIACH ZATOKOWYCH

Materiały informacyjne, instrukcja stosowania dla Sinus Rinse, Naso Gel i Nasa Mist.

Łatwy i naturalny sposób usunięcia dolegliwości alergicznych i objawów zapalenia zatok



NeilMed®
SINUS RINSE™



Duża objętość i niskie ciśnienie
Opatentowana mieszanka i wzór butelki
Izotoniczny, pediatryczny, hipertoniczny
Lecnicze płukanie nosa i zatok wygrywa z aerozolem

SINUS RINSE to produkt amerykańskiej firmy medycznej NeilMed Pharmaceutical Inc. Nazwa SINUS RINSE to dwa słowa, które w dokładnym tłumaczeniu znaczą SINUS – zatoki, RINSE – płukać. I jest to odpowiedź na podstawowe pytanie do czego służy zestaw SINUS RINSE.

Jak działa zestaw SINUS RINSE?

Mechanicznie:

- dzięki dużej objętości roztworu (dla dorosłych 240ml, dla dzieci 120ml – każde płukanie) dokładnie płucze usuwając na zewnątrz zawartość nosa i zatok

Lecznico:

- roztwór do płukania zawiera chlorek sodu i dwuwęglan sodu co powoduje działanie antyseptyczne, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe

Nawilżająco:

- duża objętość roztworu

Płuczac nos i zatoki pozbywamy się:

- zalegającej wydzieliny produkowanej przez zatoki
- krwi, skrzepów i innych pozostałości po zabiegach operacyjnych
- kataru
- śluzu
- stanów zapalnych
- zanieczyszczeń pochodzących ze środowiska (pyłków, kurzu, itp)

Kiedy zalecane jest stosowanie SINUS RINSE?

- w zapaleniu zatok, którego podłożem mogą być infekcje, grypa, przeziębienie, alergie, polipy, czynniki chemiczne
- w nieżyłości nosa (infekcje, alergie i inne)
- po zabiegach operacyjnych na nosie i zatokach (leczenie stanów zapalnych)
- dla odbudowania śluzówki po długotrwałym stosowaniu leków do nosa
- przed podaniem leków do nosa
- przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi na nosie i/lub zatokach
- profilaktycznie dla utrzymywania higieny śluzówki nosa i zatok

Dodatkowe informacje

- płukanie dużą objętością roztworu zwiększa właściwości lecznicze
- łagodny dla nosa, nie piecze, ani nie podrażnia
- z saszetki uzyskujemy roztwór izotoniczny lub hipertoniczny o odpowiednim dla organizmu pH
- specjalnie ukształtowana końcówka butelki jest wygodna w użyciu
- miękka butelka pozwala na efektywne wykonywanie płukania
- 100% wykorzystanej objętości butelki do zabiegu
- niezastąpiony po zabiegach chirurgicznych
- mogą stosować kobiety w ciąży
- w sprzedaży są zestawy dla dzieci i dla dorosłych

Instrukcja stosowania:

WAŻNE: w celu uzyskania najlepszych rezultatów, opatentowana przez NeilMed receptura mieszanki w saszetkach powinna być użyta z opatentowaną butelką do płukania 120 ml, 240 ml lub 480 ml. Można używać saszetek NeilMed z innymi urządzeniami do płukania nosa, pod warunkiem użycia zalecanej ilości wody potrzebnej do rozpuszczenia saszetki.

OSTRZEŻENIE: Nie stosować, jeśli nos jest całkowicie zablokowany (można stosować przy częściowej blokadzie nosa), występuje infekcja lub uczucie zatkania ucha. Po operacji ucha należy przed płukaniem zasięgnąć opinii lekarza. Jeśli doświadcza się uczucia nacisku w uszach, należy przerwać płukanie i skontaktować się z lekarzem. **UWAGA: Nie stosować nieprzepracowanej wody z kranu. Nie używać gorącej wody ani wrzątku!**

STOSOWAĆ NAJPOŹNIEJ NA GODZINĘ PRZED SNEM. Stanowczo odradza się stosowanie zestawu przez dzieci, dorosłych z ograniczoną świadomością (np. z demencją lub chorobą Alzheimera) i pacjentów w złym stanie zdrowia, którzy nie mogą dokonać samodzielnie zabiegu. Dzieci mogą stosować preparat jedynie pod opieką osoby dorosłej, która powinna znać i rozumieć sposób stosowania produktu. Sposób stosowania jest taki sam bez względu na wiek. Zaleca się stosowanie płukania zestawem u dzieci powyżej 4 roku życia. Jeśli dziecko ma mniej niż 4 lata, należy przed zastosowaniem produktu skontaktować się z pediatrą.



PRZED UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ!

KROK 1: Umyć ręce. Czystą butelkę napełnić ciepłą, przegotowaną wodą do miejsca oznaczonego przerywaną linią. Można podgrzać butelkę z wodą w mikrofalówce, ale nie dłużej niż 5 sekund, aby uniknąć nadmiernego nagrzania wody i zniszczenia butelki.

KROK 2: Przeciąć róg saszetki z mieszanką NeilMed i wsypać jej zawartość do butelki. Należy nakrętkę z rurką na otwór w butelce, dokładnie zakręcić, następnie zatkać palcem otwór w nakrętce i wstrząsnąć butelką w celu rozpuszczenia mieszanki.

KROK 3: Stań przy umywalce, pochyl się i nachylić głowę. Trzymając usta otwarte i nie wstrzymując oddechu, przyłóż otwór w nakrętce butelki do dziurki od nosa. Delikatnie ścisnąć butelkę, tak aby roztwór dostał się do nosa i wypłynął drugą dziurką, odpowiada to 1/2 objętości butelki. Nie należy polykać roztworu.

KROK 4: Po zakończeniu płukania jednej dziurki delikatnie wydmuchaj powietrze przez nos, aby nie spowodować nadmiernego nacisku na błonę bębenkową. Jeżeli roztwór dostanie się do gardła, należy je wypłukać.

KROK 5: Powtórzyć krok 3 i 4 przy płukaniu drugiej dziurki. Pozostała ilość roztworu wylać. Przed każdym płukaniem należy zrobić świeży roztwór. Przepłukiwać nos raz lub dwa razy dziennie, albo według wskazań lekarza.

Nie zawiera jodny i konserwantów. Skład: chlorek sodu, dwuwęglan sodowy. Produkt medyczny posiadający znak CE dostępny bez recepty

Instrukcja czyszczenia butelki NeilMed Sinus Rinse:

Butelkę i inne elementy zestawu należy przechowywać czyste.

Przed każdym użyciem sprawdzić, czy w butelce, na nakrętce i w rurce nie występują jakieś przebarwienia. Jeśli są, należy butelkę wyczyścić. Po każdorazowym użyciu produktu zaleca się postępować dokładnie według poniższej instrukcji:

- Przepłukać nakrętkę, rurkę i butelkę pod bieżącą wodą.
- Rozłożyć poszczególne części urządzenia na czysty papierowy ręcznik, by wyschły, lub użyć do tego celu Nasadock.



Nasadock ułatwia osuszanie i przechowywanie butelki, nasadki i rurki Sinus Rinse. Dostępny jest w kilku kolorach.

Należy przed każdym użyciem sprawdzić butelkę pod kątem przebarwień. Jeżeli przebarwienia pozostają po umyciu lub jeżeli występują jakiegokolwiek uszkodzenia, należy zaopatrzyć się w nową butelkę. Sugeruje się wymianę butelki co trzy, cztery miesiące.

WAŻNA informacja: Nie myć produktu w zmywarce do naczyń. Inną metodą czyszczenia butelki jest użycie octu lub spirytusu rektyfikowanego (99%).

Przechowywać w suchym miejscu.

Uwaga: Nie przechowywać butelki z zakręconą na niej nakrętką. Nie przechowywać mokrych części w plastikowej torebce. W podróży wilgotne elementy produktu należy oddzielnie owinąć w papierowy ręcznik. Do czyszczenia w podróży może być użyte płynne mydło. Nie używać butelki, jeśli jest zniszczona lub posiada przebarwienia, których nie można usunąć. Nie wkładać butelki, nakrętki i rurki do gotującej się wody, ponieważ ulegnie zniszczeniu.



NeilMed NasaMist Saline Spray – instrukcja stosowania:

Izotoniczny (stężenie 0,9% chlorku sodu) lub hipertoniczny (stężenie 1,8% chlorku sodu) roztwór chlorku sodu i dwuwęglanu sodu w oczyszczonej wodzie w postaci aerozolu w opakowaniu z aplikatorem.

Skład: Chlorek sodu, dwuwęglan sodowy, woda klasy USP.

Wskazania: Spray zaleca się stosować do nawilżania wysuszonej śluzówki nosa i łagodzenia stanów zapalnych.

Właściwości: Spray doskonale nawilżający suchą śluzówkę nosa, likwidujący uczucie suchości, oczyszcza śluzówkę, działa przeciwzapalnie.

Jak stosować: Włożyć końcówkę aplikatora do nozdrza i delikatnie nacisnąć aż wystarczająca ilość roztworu zostanie rozpylona. Czynność powtórzyć w drugim nozdrzu. **NIE WKŁADAĆ KOŃCÓWKI SPRAY'U GŁĘBIJ NIŻ DO KOŃCA CIĘSZEGO WYLOTU NA APLIKATORZE.** Używać zgodnie z zaleceniem lekarza. **PRZED UŻYCIEM U DZIECKA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM PEDIATRĄ.**

Przeciwwskazania: Nie stosować w przypadku zablokowanego nosa, kłopotów z ciśnieniem w uszach, po zabiegach operacyjnych w rejonie uszu, nosa i zatok.

Ostrzeżenie: Może pojawić się uczucie pieczenia przez kilka sekund, które po chwili ustępuje. Pojemnik pod ciśnieniem.

Przechowywanie: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed słońcem, przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

Pojemność: Izotoniczny 75 ml, Hipertoniczny 125 ml. Produkt medyczny posiadający znak CE dostępny bez recepty. Data ważności: na opakowaniu

